

# La innovación que marca la diferencia en diseño y rendimiento

Comodidad y rapidez para el paciente

## Diseño innovador que no cubre la nariz

Elimina las marcas en el puente de la nariz y proporciona a sus pacientes el campo de visión más amplio (180°).

## Clips de ajuste rápido

Proporciona una fácil y rápida colocación y ajuste

## Sistema modular

Un único armazon para todos los tamaños de almohadillado

Almohadilla pequeña	1090692
Almohadilla mediana	1090693
Almohadilla grande	1090694

## Discreto, suave y cómodo arnés

Arnés grande	1090696
Arnés estándar	1090697

## Desconexión rápida

Tubo de liberación rápida	1090689
---------------------------	---------

Clips del arnés x 2	1090698
---------------------	---------

Mascarilla con arnés	Internacional <sup>(2)</sup>
Pequeña	1090662
Mediana	1090663
Grande	1090664

Medidor de tamaño	1090699
-------------------	---------



# Consejos útiles

Le ofrecemos algunos consejos para tener en cuenta cuando ajuste y use la mascarilla Amara View.



A diferencia de la mayoría de mascarillas faciales, el tamaño de la almohadilla de Amara View se determina midiendo la profundidad de la nariz mediante el sencillo medidor de tamaño.

Solo tiene que colocarse el medidor de tamaño bajo la nariz **sin presionar las mejillas**; la punta de la nariz indicará si se necesita una almohadilla de tamaño pequeño, mediano o grande. **Si la medición está cerca del umbral, elija siempre el tamaño más pequeño.**

## Instrucciones de ajuste



1 Añeje el arnés. Gire los clips del arnés para desconectarlos.



5 Conecte los clips del arnés presionándolos sobre la montura.



2 Elija un tamaño de almohadilla que cubra la boca y repose sobre la base de la nariz.



6 Retire las lengüetas del arnés para ajustar de manera uniforme las tiras superior e inferior.



3 Sujete suavemente la mascarilla sobre la cara y pase el arnés por encima de la cabeza.



7 Ajuste la tira superior de manera que el arnés se ajuste de forma holgada y resulte cómodo.



4 Asegúrese de que la nariz quede por encima **(no dentro)** de la apertura para las fosas nasales de la almohadilla.



8 Conéctela a una máquina de CPAP en funcionamiento para realizar los ajustes finales.

Si desea recibir más consejos de ajuste, averiguar cómo realizar ajustes en caso de fuga o consultar las instrucciones de limpieza, consulte nuestras guías de vídeo; visite: [www.philips.es/saos](http://www.philips.es/saos)

(1) Global: Alemán, español, francés, inglés, italiano, neerlandés, portugués brasileño.

(2) Internacional: Alemán, árabe, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, hebreo, húngaro, inglés, italiano, kazajo, letón, lituano, macedonio, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio, sueco, turco, ucraniano.

© 2016 Koninklijke Philips N.V. Reservados todos los derechos. Las especificaciones podrán modificarse sin previo aviso.

[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)  
Broudy CSP 4/28/16 MCI 4107290 PN 1127492

