

Recomendaciones de uso de los protectores oculares para fototerapia

V0106-24

Indicaciones de uso

- * El producto está indicado para uso como protector ocular durante sesiones de fototerapia. Está diseñado para uso en pacientes pediátricos y neonatales.

Precauciones y advertencias

- * El producto está diseñado para utilizar solamente sobre piel sana.
No utilizar en zonas donde la dermis pudiera estar afectada.
- * Solamente deben utilizarse los protectores oculares para fototerapia cuando el paciente esté siendo supervisado continua y directamente por profesionales médicos.
- * Revise con regularidad el ajuste y el correcto posicionamiento del protector.
- * Mantener la superficie de la almohadilla limpia y seca.
- * Evitar la acumulación de humedad.
- * Verificar frecuentemente la condición dérmica del paciente en las zonas de apoyo.
- * Controlar la adecuada colocación a fin de evitar generar puntos de presión.
- * No se debe lavar o humedecer los protectores antes o durante su uso.
- * Los protectores son para uso en un solo paciente y no se deben lavar.

Almacenamiento de almohadillas

- * Conservar en lugar fresco, seco y reparado del sol.

Instrucciones de uso

- * Seleccione el tamaño adecuado.
Tamaño aproximado:
Chico: 28 semanas y menos (circunferencia < 26 cm)
Mediano: 29-36 semanas (circunferencia 26-34 cm)
Grande: 37 semanas en adelante (circunferencia > 34 cm)
- * Coloque el soporte posterior detrás de la cabeza.
- * Cubra los ojos con el protector frontal.
- * Sujete suavemente las tiras de Velcro en los extremos del soporte posterior



Características y beneficios

- * Material de protección ocular suave y acolchado, con diseño de anteojos de sol.
- * Cobertura ocular diseñada para comodidad y seguridad del paciente.
- * Cinta ajustable para la cabeza, diseñada para minimizar el deslizamiento y reducir el moldeado a la cabeza.
- * Forma única de la cinta de la cabeza diseñada para garantizar un ajuste ideal.
- * Libre de látex de goma natural y plastificantes DEHP.
- * Empaquetado individualmente.

Producto No Estéril para uso en un solo paciente
Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias
Director Técnico: Bioing. Gabriel Braidot MN: 5946
Autorizado por la ANMAT: PM-1136-113

Si encuentra algún defecto, inconveniente o desea efectuar cualquier consulta o sugerencia, por favor no dude en comunicarse, para nosotros su colaboración es una oportunidad de mejora y necesitamos recibir sus opiniones. Fabricado en la Argentina por: **Electromedik S.A.**