


Recomendaciones de uso de los soportes para tubos endotraqueales (TE)

IO-GO-016-005, V0106-24

Preparación

- 1) Seleccione el soporte del tamaño adecuado con la cinta de medición. Coloque el extremo (línea media) de la cinta a la altura del tabique nasal y llévela hacia la oreja. El sector que queda en la apertura del canal del oído corresponde al tamaño de soporte, si el tamaño está entre dos sectores, use el tamaño mayor.
- 2) Para garantizar que se ajuste correctamente, coloque el soporte por el centro de la boca, entre los labios superior e inferior. El soporte no debe entrar en contacto con los labios. Las lengüetas deben quedar en la parte delantera de la oreja.
- 3) Limpie y seque la piel conforme al protocolo de la institución. **Nota:** Es importante que la piel esté lo más limpia y seca posible. Las lengüetas no se adhieren correctamente a piel húmeda o al cabello. Los aceites y lociones perjudicarán la adhesión. **NO UTILICE ALCOHOL**

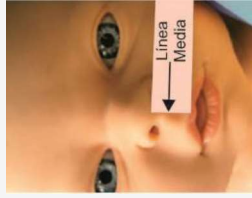

Aplicación

- 1) Antes de posicionar el soporte y retirar los recubrimientos de papel de los adhesivos, las lengüetas adhesivas hidrocoloideas deben calentarse activamente. Las técnicas de calentamiento incluyen: sostener entre las palmas de las manos durante al menos 60 segundos, sostener cerca de un calentador radiante durante 10 a 15 segundos.

- 2) Retire los recubrimientos de papel. Aplique las lengüetas en la parte delantera de la oreja, presiónelo sobre el plano óseo, y sosténgalas en posición 60 segundos para garantizar una adhesión adecuada.

Nota: Asegúrese de que el tubo ET quede por debajo del soporte, para reducir la presión en el paladar o la encía.

- 3) Envuelva cinta adhesiva angosta alrededor de la punta del soporte, y luego continúe alrededor de la punta del soporte y el tubo ET.

Extracción

- 1) Cambie cada 5 días o según el protocolo de la institución, lo que suceda primero.
- 2) Desenvuelva la cinta para separar el tubo ET de la punta del soporte.
- 3) Sature las lengüetas con agua o solución salina.
- 4) Despegue lentamente las lengüetas adhesivas hidrocoloideas de la piel mientras humedece con agua o solución salina.



RETIRO DE EMERGENCIA

Corte la parte fina del soporte con tijeras romas en la unión de la barra y la lengüeta. Retire el soporte.

Retire las lengüetas posteriormente. (Vea la sección de extracción)



Precauciones y advertencias

* El producto está diseñado para utilizar solamente sobre piel sana.

No utilizar en zonas donde la dermis pudiera estar afectada.

* El producto está diseñado para favorecer el posicionamiento del TE, pero se deberá utilizar bajo la supervisión permanente de personal experto.

* Su uso debe interrumpirse de inmediato si se produce irritación cutánea.

Controlar la condición dérmica en los puntos de contacto.

* El soporte no deberá entrar en contacto con los labios.

* Las lengüetas adhesivas hidrocoloideas no se adhieren correctamente a la piel húmeda o al cabello. Los aceites y las lociones afectarán de forma negativa a la adhesión.

* No utilice alcohol para limpiar la piel antes de su aplicación.

* Revise con regularidad el ajuste y el correcto posicionamiento del protector evitando puntos de presión.

* Mantener la superficie de la almohadilla limpia y seca.

* Evitar la acumulación de humedad.

* No se debe lavar o humedecer los protectores antes o durante su uso.

* Los protectores son para uso en un solo paciente.

Almacenamiento: **Conservar en lugar fresco, seco y reparado del sol.**

Producto No Estéril para uso en un solo paciente

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Director Técnico: Bioing. Gabriel Braidot MN: 5946

Autorizado por la ANMAT: PM-1136-115

Si encuentra algún defecto, inconveniente o desea efectuar cualquier consulta o sugerencia, por favor no dude en comunicarse, para nosotros su colaboración es una oportunidad de mejora y necesitamos recibir sus opiniones. Fabricado en la Argentina por: **Electromedik S.A.**