

Recomendaciones de uso de los collarines para traqueostomía
IO-GO-016-004, V0206-24

Indicaciones de uso

- * El producto está indicado para la sujeción y fijación de la cánula de traqueostomía.

Precauciones y advertencias

- * El producto está diseñado para utilizar solamente sobre piel sana.
No utilizar en zonas donde la dermis pudiera estar afectada.
- * Revise con regularidad el ajuste y el correcto posicionamiento del collarín.
- * Mantener la superficie de la almohadilla limpia y seca.
- * Evitar la acumulación de humedad.
- * Verificar frecuentemente la condición dérmica del paciente en las zonas de apoyo.
- * Los collarines son para uso en un solo paciente y no está previsto su reúso.
- * Cambie los collarines con regularidad.
- * Provee un ajuste estable y reduce la chance de extubación accidental.

Almacenamiento de los collarines

- * Conservar en lugar fresco, seco y reparado del sol.

Instrucciones de uso

- * Coloque el collarín por detrás del cuello.
- * Pase las tiras a través de las aperturas de la cánula de traqueostomía.
- * Sujete suavemente las tiras de Velcro para generar cierta tensión en el collarín.

Producto No Estéril para uso en un solo paciente

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Director Técnico: Bioing. Gabriel Braidot MN: 5946

Autorizado por la ANMAT: PM-1136-114 Fabricado por: **Electromedik S.A** (54 11) 4588-1606