

# Confort de gel para dormir mejor

## Mascarilla facial Amara Gel de Philips Respironics

### Guía para ajustar la mascarilla



1

Antes de colocarse la mascarilla, sujete los clips del arnés y gírelos tirando hacia afuera para desacoplarlos.

**Nota:** *lávese las manos y la cara antes de usar la mascarilla; evite el uso de hidratantes y lociones.*



2

Colóquese el arnés y apoye la mascarilla sobre la cara.

**Nota:** *puede que tenga que aflojar el arnés para hacerlo más grande.*



3

Mientras sujeta la mascarilla en la posición adecuada, acople de nuevo los clips en la montura haciendo presión.

**Nota:** *el arnés debe encontrarse en posición plana sobre la parte posterior de la cabeza.*



4

El mecanismo que se encuentra a la altura de la frente dispone de un botón de ajuste. Manténgalo presionado hasta abrirlo al máximo alejándolo del rostro.

**Nota:** *debería sentir una leve presión sobre el puente de la nariz.*



5

Para colocarse la mascarilla de un modo cómodo, ajuste primero las tiras inferiores y después las superiores de manera uniforme.

**Nota:** *no las apriete demasiado. La almohadilla de la frente solo debe ejercer una leve presión sobre la frente.*



6

Los ajustes finales para un mayor confort y sellado, se deben realizar mientras está tumbado con la presión encendida de la CPAP.

**Nota:** *si sigue observando fugas importantes, pruebe con un tamaño de almohadilla diferente.*

Puede encontrar más información sobre el ajuste en las instrucciones que vienen con la mascarilla. Asimismo, puede solicitar un arnés de mayor tamaño.

Si desea más información, visite [www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)

Broudy CSP 10/24/14 MCI 4106309 PN 1118299

**PHILIPS**  
**RESPIRONICS**