

PHILIPS
RESPIRONICS

DreamWisp



Comodidad

con cada movimiento

© 2019 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

RRDPGH AP 5/9/19 PN2500288
1010 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668
800 345 6443 • 724 387 4000

www.philips.com/respironics

Comodidad con cada movimiento

Presentamos la mascarilla de mínimo contacto DreamWisp de Philips Respironics, la marca n.º 1 en terapia* del sueño† de especialistas del sueño de EE. UU. DreamWisp ayuda a sus pacientes a dormir cómodamente con cada movimiento, ya que combina la libertad del revolucionario diseño de tubo en la parte superior de la cabeza de DreamWear con el sellado de la almohadilla nasal de mínimo contacto de Wisp.

Ahora, puede proporcionar a sus pacientes una solución innovadora que les permita dormir como lo desean sin tener un tubo restrictivo en la cara. El diseño de DreamWisp dirige el flujo de aire a través del marco para que los pacientes puedan dormir cómodamente, y la conexión del tubo en la parte superior de la cabeza permite que los pacientes duerman en cualquier posición que deseen, boca abajo, de costado o de espaldas.

Beneficios de DreamWisp

- El tubo en la parte superior de la cabeza permite a los pacientes dormir en cualquier posición que deseen
- El flujo de aire a través del marco de la mascarilla permite a los pacientes dormir cómodamente
- La almohadilla nasal de mínimo contacto proporciona comodidad y sellado
- El arnés de cuatro puntos proporciona estabilidad



Philips DreamWisp

Marco de silicona
Material ligero y flexible
diseñado para la comodidad

Flujo de aire en el marco
El diseño único permite
que el flujo de aire a
través del marco ayude
a los pacientes a dormir
cómodamente en
cualquier posición


Arnés de cuatro puntos
Proporciona estabilidad
y ajuste excepcional


Clips magnéticos
Para colocar y
liberar fácilmente

**Conexión del tubo en
la parte superior de la cabeza**
Proporciona libertad de
movimiento durante toda
la noche

Campo de visión abierto
Use anteojos, lea
y vea televisión

**Diseño de la almohadilla
nasal de mínimo contacto**
Para un ajuste y
comodidad excepcionales

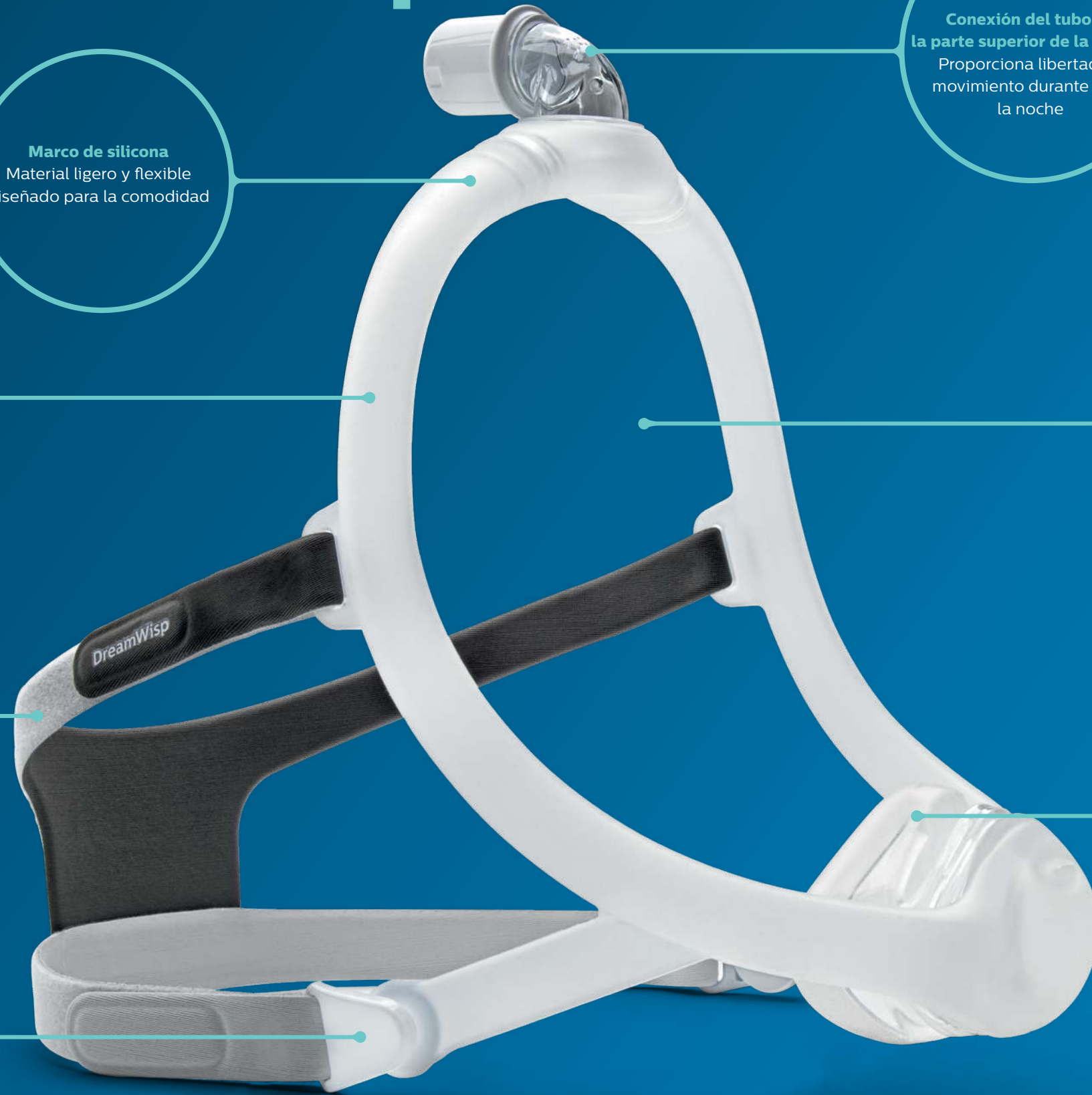



Vea lo que dicen
los médicos sobre
DreamWisp

El 97 % de los médicos
dijo que recomendaría
DreamWisp a otro
médico, mientras que
el 73 % recomendaría
ResMed AirFit N20*

El 97 % de los médicos
dijo que recomendaría
DreamWisp a un paciente,
mientras que el
73 % recomendaría
ResMed AirFit N20*

Los médicos están más satisfechos con
el sellado de DreamWisp que con el
sellado de ResMed AirFit N20*

Los médicos estaban
más satisfechos con
la identificación del
tamaño correcto con
DreamWisp que con
ResMed AirFit N20*

El 87 % de los médicos
dijo que la mascarilla
DreamWisp se ajusta
mejor que la del
ResMed AirFit N20*

*Prueba de facilidad de uso del clínico de abril de 2018, n = 30 mascarillas
comparadas incluidas ResMed AirFit N20 y PRI DreamWisp



Guía de adaptación de pacientes DreamWisp

Siga las instrucciones para comenzar a colocarse la mascarilla DreamWisp



1

Seleccione la almohadilla que se ajuste al ancho de su nariz sin bloquear las fosas nasales. La parte superior de la almohadilla puede quedar entre el puente y la punta de la nariz. Hay cinco tamaños de almohadillas disponibles: extra pequeña, pequeña, mediana, grande, extra grande



2

Retire uno o ambos clips magnéticos del receptor de clips magnéticos.



3

Tire del arnés por arriba de la cabeza.



4

Coloque la almohadilla sobre la nariz.



5

Sujete los clips magnéticos a los receptores de clips magnéticos.



6

Para ajustar el arnés, despegue las lengüetas inferiores del arnés de la tela. Ajuste uniformemente la longitud de las correas. Presione las lengüetas contra la tela para volver a colocarlas. Repita este paso con las correas superiores.



7

Coloque la mascarilla hasta que encaje cómodamente. Cuando haya terminado, el codo debe descansar arriba de la cabeza. La almohadilla debe apoyarse, de forma cómoda, sobre la cara sin bloquear las fosas nasales.

Nota: Lea las instrucciones de uso para obtener información adicional sobre el ajuste.

Información de pedido

Mascarilla nasal DreamWisp con configuraciones de conector medio

Número de parte

DreamWisp con arnés, almohadillas chicas, medianas y grandes

1137916

DreamWisp con arnés, almohadilla mediana

1137934

Obtenga más información

Para obtener más información,
visite www.philips.com/dreamwisp.

